

Airtraq Avant

VÍDEO LARINGOSCÓPIO

Patente US No 6,843,769

ÓPTICA

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO

Airtraq Avant é um vídeo laringoscópio desenvolvido para facilitar a intubação traqueal, que permite o controle visual total da via aérea durante todo o processo de intubação. Airtraq Avant não requer hiperextensão do pescoço e permite intubar os pacientes em praticamente qualquer posição. A visualização poderá ser realizada diretamente pelo ocular do Airtraq ou conectando-o a qualquer Endo Cam ou ainda com os acessórios fornecidos pelo fabricante.


COMPONENTES

Airtraq Avant é composto por 3 elementos que devem ser montados pelo usuário cada vez que uma intubação for realizada:

Óptica: Uma parte **REUTILIZÁVEL** que contém a parte Óptica, o sistema anti-embaçamento e os sistemas eletrônicos. Essa área é articulada para facilitar a inserção da lâmina do laringoscópio. A Óptica só funciona quando está totalmente inserida uma lâmina no dispositivo.



Lâmina: uma parte rígida e **DESCARTÁVEL** de plástico, moldada anatomicamente que é composta por dois canais laterais. Um que termina em uma lente distal para inserção da Óptica e o outro canal aberto na sua extremidade distal atua como um canal guia para o tubo endotraqueal.

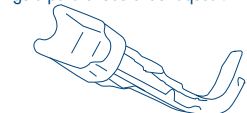

A ocular: uma porção **DESCARTÁVEL** que é montada na parte superior da lâmina e fornece conexão direta para a maioria das Endo Cams.



Além disso, o sistema Airtraq Avant inclui uma "estação de ancoragem" ou estação de carga chamada Docking Station, que recarrega a bateria da Óptica e informa sua vida útil remanescente. No caso de Ópticas danificadas, o display de LCD mostrará um código de erro. Instruções detalhadas para o uso dessa estação são fornecidas em sua embalagem.



VÍDEO ÚTIL DA ÓPTICA

A vida útil do Airtraq Avant é definida pelo fabricante como o número de vezes que a Óptica é funcional, ou seja, 50 utilizações. Uma vez que essa vida útil terminar a Óptica deve ser descartada pelo usuário.

Essa vida útil começa quando o usuário liga a Óptica pela primeira vez. Cada vez que esse sistema permanece ligado, e o período de aquecimento da lente tiver terminado, conta-se um uso.

O número de utilizações restantes é apresentado na Docking Station quando a Óptica é inserida na estação. A Óptica também inclui um indicador luminoso, que fornece informações sobre a vida útil disponível.

- Uma luz verde indica que há 10 ou mais utilizações remanescentes.
- Uma luz piscando em laranja indica que há menos de 10 utilizações remanescentes.
- Uma luz vermelha estável indica que a vida útil do sistema foi encerrada.

O prazo para utilização das lâminas e ocular estão limitadas à data de validade.

MANUSEIO, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Não armazenar ou transportar a Óptica a temperaturas inferiores a 0°C nem superiores a 40°C. A umidade relativa não deve ser superior a 95%. A pressão atmosférica não deve exceder 500 a 1060 hPa.

CARACTERÍSTICAS DA BATERIA

Cada Óptica está equipada com uma bateria recarregável que fornece uma tensão de 3,7 V que alimenta o LED e sistema anti-embaçamento.

A bateria deve ser inserida antes de ser usada. Para inserir a bateria, remova a tampa da bateria, segure a bateria como na figura abaixo e coloque-a no espaço para a bateria nesta posição.



A bateria é fornecida sem carga; é recomendável realizar um ciclo completo de carga/descarga da bateria antes de começar a utilizar a Óptica para fins clínicos.

Quando a bateria estiver totalmente recarregada a Óptica pode ser utilizada por aproximadamente 15 intubações.

O fabricante recomenda recarregar a bateria após cada intubação. Um ciclo de recarga completa dura 2 horas. O período para descarregar, sem uso, uma bateria totalmente carregada é de mais de 30 dias.

Quando a Óptica está inserida na Docking Station é exibido o status da carga da bateria. A Óptica também possui um indicador luminoso que fornece informações sobre a carga da bateria.

• A luz verde significa que há mais de 25% de carga de bateria restante.

• Uma luz laranja piscando significa que há menos de 25% de carga de bateria restante (aproximadamente 4 intubações).

• A luz vermelha estável significa que a carga da bateria é inferior a 15%.

• Se o usuário tentar ligar o Airtraq Avant e a carga da bateria estiver abaixo de 15%, então a Óptica desliga-se automaticamente após 5 segundos, assim, uma nova intubação não pode ser iniciada.

A fim de evitar descarga indesejada da bateria, a Óptica é automaticamente desligada se deixada em uma lâmina por mais de 30 minutos. Três minutos

antes do desligamento, a luz irá piscar a cada 10 segundos.

TAMANHOS LÂMINA

Standard: A-511. Tamanho 3. Para uso em TET 7,0-8,5. Abertura mínima da boca do paciente: 17 mm.

Pequeno: A-521. Tamanho 2. Para uso com TET 6,0-7,5. Abertura mínima da boca do paciente: 17 mm.


TÉCNICA DE INTUBAÇÃO COM O AIRTRAQ AVANT

I. ÓPTICA, LÂMINA E MONTAGEM DA OCULAR

• Verifique o status da bateria da Óptica e o tempo vida útil disponível na Docking Station.

• Selecione o tamanho apropriado de lâmina de acordo com o tamanho de TET a ser usado

• Insira a Óptica na lâmina totalmente, até que se encaixe na posição.

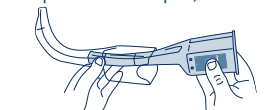

• Posicione a ocular na extremidade proximal da Óptica. Só existe uma posição na qual ele se encaixa.



• Assim que a lâmina for inserida, a luz começará a piscar por 35 segundos até que o sistema anti-embaçamento aqueça a lente da lâmina. Uma vez que o dispositivo estiver pronto para intubação a luz irá tornar-se constante.

II. PREPARAÇÃO

• Lubrifique o TET e introduza-o no canal lateral da lâmina sem tocar na lente.

• Alinhe a ponta do TET com o final do canal lateral.

III. POSICIONAMENTO DO AIRTRAQ AVANT DENTRO DA VIA AÉREA (Fig. 1)

• Insira o Airtraq Avant na linha média da boca do paciente. Preste especial atenção para evitar empurrar a língua para dentro da faringe.

• Antes de atingir o plano vertical, olhe para identificar estruturas.

• Continue a deslizar o Airtraq Avant até reconhecer a epiglote e situar a ponta na valcúla. Outra alternativa é situar a ponta do Airtraq Avant por baixo da epiglote. (Estilo Miller).

• Faça um ligeiro movimento de tração vertical para cima a fim de deixar as cordas vocais à vista.

IV. INTRODUÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL E REMOÇÃO DO AIRTRAQ AVANT DA VIA AÉREA DO PACIENTE (Fig. 2 e 3)

• **Alinhe as cordas vocais no centro do campo visual** movendo delicadamente a ponta da lâmina.

• Avance o TET gentilmente no canal glótico lateral. Se necessário, gire o TET no canal. Verifique a profundidade da inserção.

• Insufle o cuff do TET e ligue o mesmo ao respirador, verificando a colocação.

• Separe o TET do Airtraq Avant retirando-o para o lado, e mantendo o TET na posição.


• Remova o Airtraq Avant da via aérea do paciente seguindo a linha média.

V. DESMONTAGEM DO AIRTRAQ AVANT

• Separe a Óptica do Airtraq Avant segurando firmemente ambos os lados da ocular. Certifique-se que a Óptica

não entre em contato com qualquer superfície contaminada.

• A Óptica é desligada automaticamente quando desconectada da lâmina.

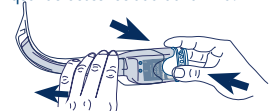

• Descarte a lâmina descartável e a ocular como quaisquer outros resíduos contaminados de acordo às legislações locais e planos de descarte ou reciclagem.

• Se necessário recolha a Óptica na Docking Station para recarga da bateria.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Adquirir experiência inicial em vias aéreas sem dificuldade.

2. Introduza o Airtraq Avant evitando a língua e deslize-o devagar e suavemente.

3. Mantenha o Airtraq Avant na linha média da boca.

4. Olhe antes de o Airtraq Avant atingir a posição vertical.

5. Não introduza muito profundamente. Se as estruturas (aritenóide, epiglote, etc.) não puderem ser reconhecidas, deslize o Airtraq SP ligeiramente para trás.

6. Uma vez que a ponta do Airtraq Avant esteja na epiglote, quer na valcúla (estilo McIntosh), quer sob a epiglote (estilo Miller), faça um ligeiro movimento de tração vertical para cima (não faça movimento de alavanca).

7. Avance lentamente o TET. Se necessário, gire o TET no canal.

CONDICIONAL PARA RM

Testes não clínicos demonstraram que Airtraq® Avant é Condicional para RM (pode ser usado) em ambiente de MRI de acordo com as seguintes condições:

• Campo magnético estático de 3 Tesla ou menos.

• Gradiente de campo magnético espacial de 720 Gauss/cm ou menos.

IMPORTANTE: The Airtraq® Avant pode ficar dentro de ambiente de RM (ex.: em sala de sistema de RM). Não deve ser utilizado diretamente no interior do sistema de RM (ex.: no interior do scanner) durante o seu funcionamento (ex.: exame). Como tal, a avaliação das interações do campo magnético do produto envolveu especificamente avaliações da atração transitória em relação à exposição a um sistema de RM de 3-Tesla.

AVISOS E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

• Este produto deve ser utilizado exclusivamente por pessoal treinado na colocação de tubos endotraqueais.

• Não deve ser feita pressão sobre os dentes com este dispositivo.

• Não se deve forçar a entrada do Airtraq Avant na via aérea superior.

• Não deve ser incinerado se as pilhas não tiverem sido retiradas.

• Não deve ser submergido em líquidos.

• Só deve ser usado com anestésicos não-inflamáveis.

• Não toque o LED da Óptica.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA ÓPTICA

A Óptica pode ser inserida e retirada da lâmina sem contato com ele.

A Óptica nunca deve entrar em contato com o paciente. Dessa forma é considerada um dispositivo não-crítico.

Em caso de contaminação a Óptica é recomendado que o mesmo sofra um processo de desinfecção de baixo-nível. Certifique-se que sua instituição siga os procedimentos de limpeza descritos nesse manual.

1. Remova a Óptica a partir da lâmina.
2. Limpeza: Use gaze de algodão embebida em solução de limpeza para limpar as superfícies externas da Óptica. Use escovas macias para acessar áreas que não puderem ser atingidas com a gaze. Soluções de limpeza que podem ser utilizadas:

- a. Detergente enzimático (por exemplo: ENZOL™ Enzymatic Detergent).
- b. Sabão com pH neutro e água.
- c. Solução de bicarbonato de sódio (8-10 %).

3. Podem ser utilizados os seguintes desinfetantes:

- a. Solução de Ácido peracético (0,08%).
- b. Alcool Isopropílico (70%).
- c. Solução contendo álcool isopropílico 70% e Clorhexidina 2% (por exemplo Clinel toalhetes).
- d. Solução contendo dióxido de cloro (por exemplo Tristel toalhetes).

4. Secar a Óptica usando uma compressa cirúrgica estéril individual.

Atenção:

- Não autoclavar.
- Não lavar sob água corrente.
- Não submergir o dispositivo.
- Evite a penetração de líquidos e umidade no interior da Óptica.
- Evite tocar na lente da Óptica.

INSTRUÇÕES DE DESCARTE DA ÓPTICA

Uma vez que a vida útil da Óptica tenha terminado, deve ser descartada da seguinte maneira:

• Retire a tampa do compartimento das pilhas deslizando para fora (afastar os entalhes).

• Retire as pilhas do Airtraq Avant e coloque-as num recipiente apropriado para a reciclagem de pilhas. As pilhas são classificadas como material de descarte não perigoso e cumprem com a Diretiva Europeia WEEE.

Seguir os regulamentos locais e planos de reciclagem dos componentes do equipamento.

GARANTIA DO FABRICANTE

O fabricante garante a Óptica do Airtraq Avant quanto a defeitos de materiais ou fabricação durante a vida útil e por um período de dois anos a partir da compra independentemente do que aconteça primeiro, desde que a mesma seja utilizada conforme indicam estas instruções. Esta garantia só é aplicável se o aparelho tiver sido adquirido através de um Distribuidor Autorizado.

A lâmina do AIRTRAQ AVANT e a ocular são projetadas para uso em único paciente.

Atenção! A limpeza e reutilização da lâmina do Airtraq Avant pode comprometer a segurança do paciente.

O uso das lâminas do Airtraq Avant que foram limpas ou esterilizadas após uso anterior pode gerar consequências graves no desempenho do produto e irá anular a sua garantia. O fabricante se exime de todas as outras garantias explícitas e implícitas, incluindo, sem limitação, as garantias de comercialização ou adequação para uso específico.




Fabricado por:
PRODEL MEDITEC LIMITED
No. 18, 7th Science Ave.
Hi-Tec Coast, Zhuhai, Guangdong
519085 P.R. China

EU Representante:
PRODEL MEDITEC, S.A.
Muelle Tomás Olaverri 5, 3º
48930 Las Arenas SPAIN

Para mais informação sobre a utilização do Airtraq Avant consulte o site

www.airtraq.com ou escreva para: info@airtraq.com

AIRTRAQ é uma marca registrada.

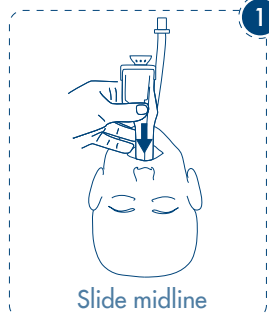


• Do not insert too deep


• Lift gently

• Twist Airtraq to center vocal cords

• Corkscrew ETT

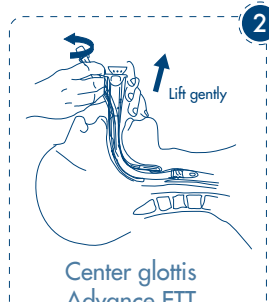

Center glottis
Advance ETT

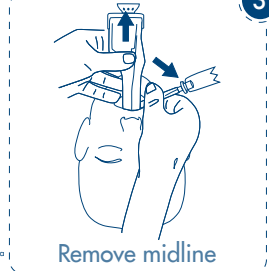

Remove midline